

	Marque :	/
	Classe CE :	/
	Durée de vie :	3 ans
	Année de mise sur le marché :	/
	Code CLADIMED :	/
	Code EMDN :	/
	Code GMDN :	/
	Version :	A
	Date :	06/04/2022

DONNEES PRODUIT

Description

Bande plâtrée à plâtre adhérent, de prise rapide, prête à l'emploi.

Caractéristiques

- ✓ Résistance/charge de rupture à sec (8 couches) : minimum 7 Kg/dm,
- ✓ Temps de prise : environ 165 secondes,
- ✓ Poids du plâtre : supérieur à 396 g/m².

Les caractéristiques du Platralfa dépendent

- de la durée du trempage,
- de la température de l'eau de trempage,
- du nombre de couches superposées,
- de la température du local de travail.

Dans les conditions normales de travail, température de 20 à 25°C avec une hygrométrie de l'ordre de 65%, le temps de malléabilité est d'environ 2 minutes 30 secondes et le séchage intervient au bout de 48 heures environ pour une superposition de 10 couches.

Classement de réaction au feu : **MO** (incombustible)

selon les normes NF P 92-501 :1995 (essai par rayonnement) et NF EN ISO 1716 :2018 (détermination du pouvoir calorifique supérieur).

Rapport N°RA20-0274, réalisé par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) et valable jusqu'au 17/11/2025.

Composition



1-Tissu (5,2%) : gaze de coton

2-Plâtre (94,8%) : plâtre (95%) et adjuvants (5%)

Contrôles des matières premières et des produits finis

Effectués par le fabricant.

Conditionnement / Stérilisation

Bandes sous sachet transparent. Produit livré non stérile.

Références

Code EAN13 carton	Code EAN13 sachet	Code Produit	Dimensions	Unités par sachet	Nombre de sachets par carton standard	Unités par carton standard
4042809255980	4042809256253	73040-03	8 cm x 3 m	4	20	80
4042809256277	4042809256260	73040-04	12 cm x 5 m	4	10	40
4042809256291	4042809256284	73040-05	24 cm x 5 m	2	10	20
4042809255973	4042809255973	73040-06	8 cm x 50 m	1	1	1
4042809382778	4042809658422	73040-08	12 cm x 5 m	2	6	12

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

USAGE REVENDIQUE

Protection des isolants et des calorifugeages, scellement, bouchage, moulage, modelage, décor, masques et sculpture.

CONSEILS D'UTILISATION
Mode d'emploi

- 1- Immerger la totalité de la bande pendant 10 à 15 secondes dans l'eau, dont la température est de 25°C au maximum.
- 2- Essorer doucement.
- 3- Appliquer et modeler la bande plâtrée en moins de 2 minutes 30 secondes (temps correspondant au temps de prise) en lissant soigneusement pour bien faire adhérer les couches entre elles.

Précautions d'emploi

- ✓ La réaction de prise du plâtre implique la production de chaleur.
- ✓ Ne rien ajouter à l'eau de trempage dans le but d'accélérer ou de ralentir le temps de prise ; toute modification du phénomène de cristallisation ayant une influence néfaste sur la résistance de l'appareil formé.
- ✓ La vitesse de prise augmente avec la température de l'eau de trempage mais la prise devient insuffisamment homogène à température élevée.

Entretien

Non applicable. Ne se lave pas. Ne pas mouiller ou humidifier l'appareil.

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
Procédés de destruction

Mise en décharge ou enfouissement, selon la réglementation locale.

Distributeur	Fabricant/Site de production
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40	BSN Medical SAS Rue du Millénaire F-72320 Vibraye